

スキンプレップ 取扱説明書

【使用上の注意事項】

- 火気をさけて使用してください。
- 健全皮膚部位以外には使用しないでください。粘膜・傷・腫れ物・湿疹等のある部位には使用しないでください。
- 目に入らないように注意してください。
- 子供の手の届かない所で保管、廃棄してください。
- 肌に異常があらわれた場合は、使用を中止して専門の医師に相談してください。
- 使用後は使用部位を石けん等で良く洗い、すすいだ後、十分に乾燥させてください。これらが不十分な場合には皮膚かぶれや新しく使用する粘着性のテープやフィルム等の粘着が悪くなる原因となります。
- 安全にお使いいただくため、用途以外には使用しないでください（外用のみ）。
- スキンプレップは可燃性ですので、火気のない涼しい場所に保管、廃棄してください。着火源の付近では火のつく恐れがあります。

【製品概要】

スキンプレップは皮膚に塗布すると無色透明な皮膜を形成します。皮膚と粘着性のテープやフィルム等の間に皮膜をつくることにより皮膚表面をおおい、はがす時の機械的刺激を低減します。

【使用目的】

粘着性のテープやフィルム等による皮膚における機械的刺激の低減。ストーマ周囲の排泄物からの保護。

【使用方法】

1. スキンプレップを塗布前に、皮膚を洗浄して乾燥させてください。
2. 袋の一部を切って、スキンプレップを手で取りだしてください。
3. 装着面より広めにスキンプレップを均一に塗り、2分程放置して乾かしてください。
4. テープやドレッシング材等の粘着材製品を使用する際には、本製品が完全に乾燥してからご使用ください。
5. テープやドレッシング材等の粘着製品を交換する際には、はがす際に本製品もはがれてしまいますので、必ず再度、本製品を塗布してください。
6. スキンプレップを再塗布する場合は、改めて皮膚を洗浄して乾燥後に手順に従って塗布してください。

緊急の処置：

- 目に入った場合は、直ちに大量の水で良く洗い流した後、専門の医師の手当てを受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに専門の医師の手当てを受けてください。

注意：

- 衣服などについた場合は、直ちに石けんとお湯で洗い、その後通常の洗濯をしてください。
- 本品は再使用できません。

【成分】

イソプロパノール、(ビニルメチルエーテル/マレイン酸ブチル)コポリマー、クエン酸アセチルトリブチル

【貯法】

高温・直射日光をさけて火気のない涼しい場所で保管してください。

【製品仕様】

製品番号	規 格
420400	紙ナプキンタイプ 50枚/箱

【輸入販売業者の名称及び住所等】

スミス・アンド・ネフュー株式会社
〒105-0014 東京都港区芝1丁目10番13号 芝日景有楽ビル
TEL：03-5443-5729 FAX：03-5443-4789
原産国：アメリカ合衆国
製造元：Smith & Nephew, Inc.